


gke-Steri-Record[®] dokumentační systém

Oblast použití

Dokumentace sterilizačních procesů umožňující propojení s dokumentací pacienta.

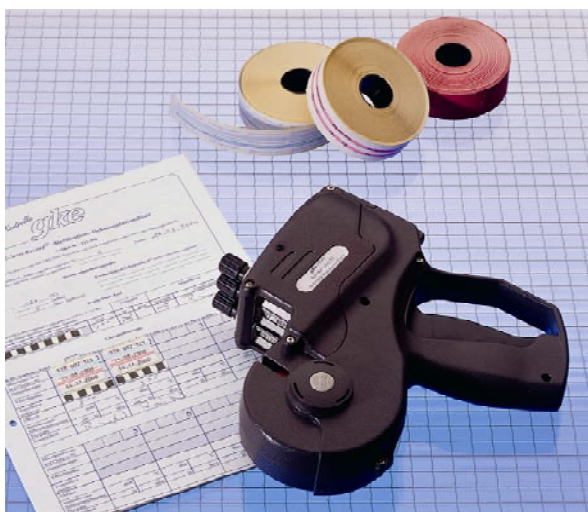

Popis výrobku

gke dokumentační systém se skládá z následujících součástí:

- třířádkové etiketovací kleště
- etikety s dvojitou samolepící vrstvou v různém barevném provedení **s** nebo **bez** procesového indikátoru pro parní, formaldehydové, etylénoxidové a peroxidvodíkové sterilizační procesy.
- dokumentační archy


Popis funkce

Dokumentační arch obsahuje všechny potřebné údaje. Pro každý sterilizátor se na jeden den používá jeden arch. Informace o datu sterilizace, datu expirace, odpovědné osobě, o čísle vsázky a event. o obsahu balení (podle číselného kódu) je možné vytisknout na samolepící etiketu pomocí třířádkových *gke* etiketovacích kleští a nalepit na každý balík vsázky a také vlepít do dokumentačního archu. Etiketovací kleště umožňují vytisknout až 12 znaků do jednoho řádku.

Etikety se nalepí na každý balík dané vsázky a také na dokumentační arch uložený na oddělení centrální sterilizace. Tyto etikety jsou identické s výjimkou kódu pro označení obsahu balíku.

Etikety se 2 samolepícími vrstvami je možné z balíku nebo kontejneru odlepit a následně vlepít pacientovi do operačního protokolu, čímž se dosáhne ideálního propojení bez dodatečné námahy.

V případě sekundární infekce je možné pomocí záznamu na etiketě vyhledat dokumentaci na oddělení centrální sterilizace, která je důkazem korektní sterilizace a umožňuje kontrolu dodržení všech parametrů sterilizace.

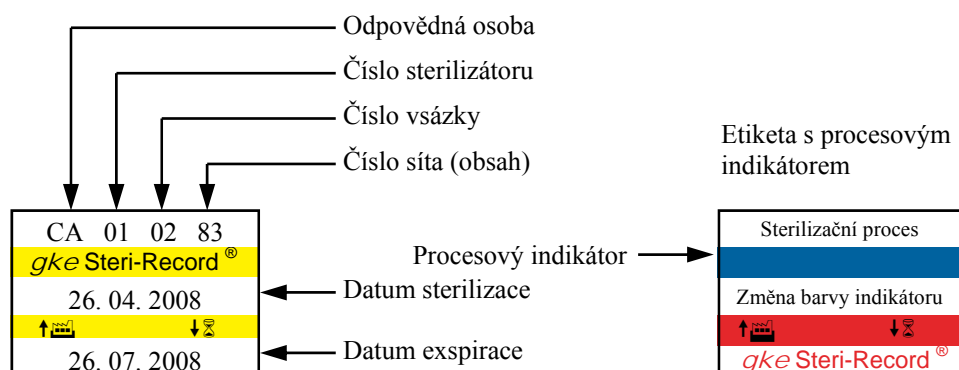

Bližší informace

Platné předpisy požadují dokumentaci výrobního procesu sterilního materiálu používaného na pacientech. Normy série EN ISO 9001 a také EN 550-554 požadují kontrolu sterilizačních procesů a dokumentaci nezávisle na tom, zda výrobce sterilizovaného materiálu jej prodává, nebo zda ho používá pro vlastní potřebu (když vyrábí nemocnice sterilní materiál pro vlastní pacienty). U každé vsázky se musí sledovat a dokumentovat všechny parametry, které ovlivňují sterilizační proces. Každá vsázka musí být označena všemi potřebnými údaji.

Výhody

- Velmi nízká pracnost označování.

Informace pro objednání

- Vyloučená možnost chyby při zapisování čísla vsázky.
- Dokumentační systém s propojením informací bez zvýšené pracnosti při označování.
- Různé barvy etiket ulehčují organizaci skladování materiálu.
- Při použití etiket s indikátorem není potřeba používat zvláštní procesový indikátor.
- Etikety s indikátorem se dodávají i pro chemické sterilizační procesy (FO, EtO, H₂O₂).
- Ekonomická efektivnost .

Výrobek/Obsah	Popis	Obj.č.:
Doku-L-12 <i>12 kot. á 750 etiket + 1 barvící váleček</i>	Etikety s dvojitou samolepící vrstvou s předtiskem <u>bez</u> procesového indikátoru (zelené, modré, červené a žluté).	240-861 až -864
Doku-L-D-12 <i>12 kot. á 750 etiket + 1 barvící váleček</i>	Etikety s dvojitou samolepící vrstvou s předtiskem <u>s</u> procesovým indikátorem pro parní sterilizaci (zelené, modré, červené a žluté).	240-871 až -874
Doku-L-E-12 <i>12 kot. á 750 etiket + 1 barvící váleček</i>	Etikety s dvojitou samolepící vrstvou <u>s</u> procesovým indikátorem pro etylénoxidovou sterilizaci (červené).	242-873
Doku-L-F-12 <i>12 kot. á 750 etiket + 1 barvící váleček</i>	Etikety s dvojitou samolepící vrstvou <u>s</u> procesovým indikátorem pro formaldehydovou sterilizaci (červené).	243-873
Doku-L-W-12 <i>12 kot. á 750 etiket + 1 barvící váleček</i>	Etikety <u>s</u> dvojitou samolepící vrstvou s procesovým indikátorem pro sterilizaci peroxidem vodíku (červené).	244-873
Doku-Labeler-N <i>1 + 1 barvící váleček</i>	Etiketovací kleště.	240-850

gke -mbH

Auf der Lind 10

D-65529 Waldems-Esch

Phone: +49 (0) 61 26 - 94 32- 0

Telefax: +49 (0) 61 26 - 94 32- 10

e-mail: info@gke-mbh.de



Scherex s.r.o.
Dolny 147
CZ 664 41, Brno-Omice

☎ +420 547 228 962

📠 +420 547 228 962

✉ info@schrex.cz