


Referenční tabulka barev

Indikátory monitorování čistícího procesu

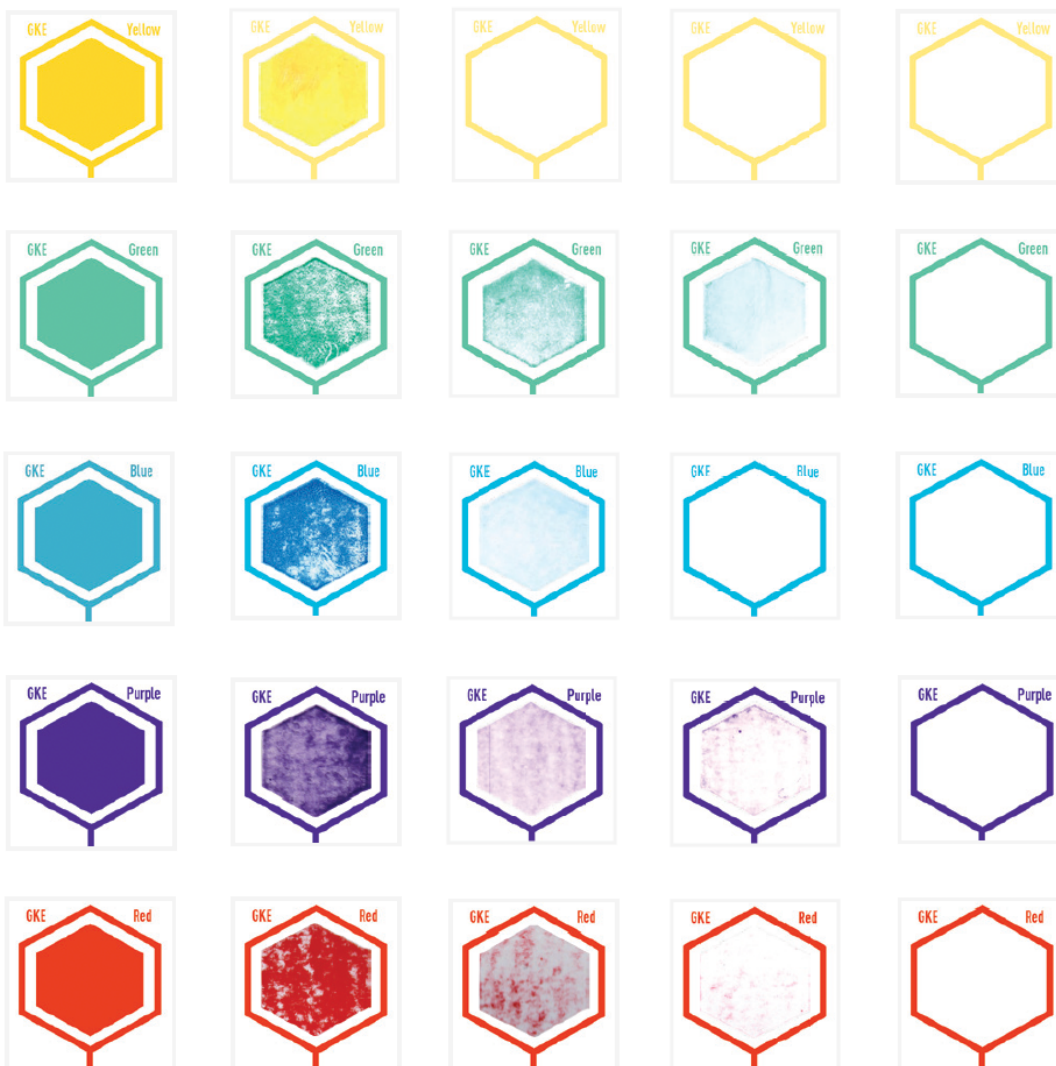

Smývací gradient



Počáteční kroky pro řešení problémů

Výsledky testů, které jsou horší než výsledky z předchozích šarží, mají různé příčiny:

Možné důvody	Akce
Špatný program	Zkontrolujte protokol šarže, zda byl pro plnění vybrán správný program.
Změněný vzorec vkládání	Zkontrolujte, zda konfigurace zátěže odpovídá specifikacím uvedeným v systému managementu jakosti a ve zprávě o validaci.
Jiné umístění indikátoru	Zkontrolujte, zda je indikátor sledování procesu mytí umístěn na správném místě.
Jiný nebo expirovaný mycí prostředek	Zkontrolujte nádobu s mycím prostředkem. Použili jste správný mycí prostředek, nebo je jeho doba použitelnosti prošlá?
Nesprávné dávkování	Zkontrolujte dávkování. Označte hladinu tekutiny v nádobě s mycím prostředkem, spusťte program a zkontrolujte, zda se hladina nebo hmotnost tekutiny liší od standardního postupu!
Nesprávná teplotní křivka	Porovnejte teplotu, čas/integrál z aktuální dávky s předchozími.
Ostřikovací rameno nefunguje	Zkontrolujte, zda lze rameno s tryskou otáčet bez odporu. Stroj se skleněnými dvířky: Zkontrolujte rameno s tryskou během procesu mytí. Ostatní stroje: Zastavte program během procesu a zkontrolujte, zda se rameno s tryskou pohybuje.
Zhoršené podmínky pro průtok vody	Zkontrolujte tvorbu pěny, selhání čerpadla, ucpané sítko
Změněná kvalita vody	Pokud se používá změkčená nebo demineralizovaná voda: Zkontrolujte systém změkčování nebo demineralizace vody testováním hodnoty pH a vodivosti.

Po kontrole výše uvedených kroků opakujte proces mytí. Změny dynamiky rozstříku a proplachování, např. ucpané trysky, netěsnosti atd., nemusí být sami detekovatelné. Pro zjištění těchto možných příčin volejte technický servis.